



# AXSOL



SÉNIORS

COUSSIN RELEVEUR POUR SIÈGE

SITNSTAND



Usage  
intérieur  
et  
extérieur



Transport  
facile



Sans  
assistance



RÉF. 825 100

#### CARACTÉRISTIQUES :

Temps gonflage /  
dégonflage  
de l'assise :  
**env. 20 sec**

Mécanisme de  
contrôle :  
bouton poussoir ↑ et  
↓

Capacité gonflage :  
**1.7L/sec**

Hauteur maximum de  
gonflage du coussin :  
**20 cm**

Type de batterie :  
**Lithium Ion 14,4V - 2,6  
Ah**

Capacité batterie :  
**300 cycles**

Autonomie :  
**minimum 50  
gonflages**


Chargement batterie  
conseillé tous les 4 à 6  
jours.

## “ Pour une plus grande indépendance en tous lieux ”

Le coussin releveur SitnStand permet à l'utilisateur de s'asseoir et de se relever seul, en toute sécurité et en douceur.

Ce matériel est aussi une aide précieuse pour les soignants et les aidants, en permettant de prévenir les TMS.

Son utilisation est très simple, grâce à un boîtier de commande et un petit compresseur sur batterie qui assure le gonflage de l'assise, ajustable selon vos besoins.

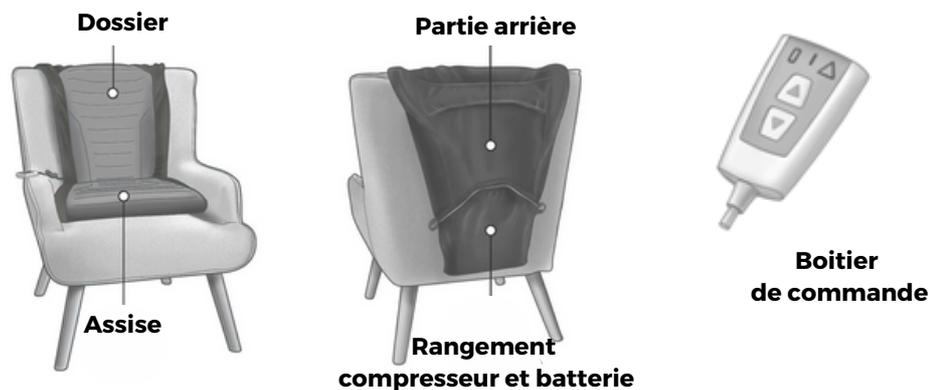

#### DIMENSIONS :

Assise dégonflée :  
**40x53x1 cm**

Assise gonflée :  
**40x48x25 cm**

Sac de transport  
inclus  
**42x54x14 cm**

Poids :  
**3,7 kg (4,2kg avec sac)**

Capacité :  
**120 kg**


Pour vous asseoir, installez-vous confortablement au centre du coussin et pressez la flèche ↓. L'assise va se dégonfler lentement.

Pour vous relever, détachez votre dos du dossier, placez vos pieds près du siège, écarter les et appuyez sur la flèche ↑ pour lancer le gonflement de l'assise. Quand vous estimez avoir atteint la position désirée, vous pouvez vous redresser.



Mobile et sur batterie, le coussin releveur gonflable SitnStand se pose sur la majorité des chaises, fauteuils, salons de jardin etc.

Vous pouvez l'utiliser partout, aussi bien chez vous, que lors de vos déplacements .

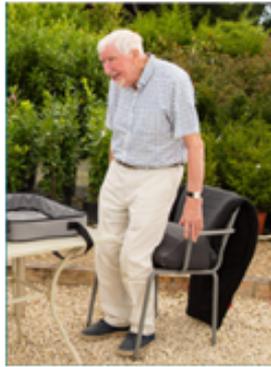

**RECOMMANDATIONS :**

Ce dispositif convient aux personnes pouvant se déplacer seules.

Lorsque vous êtes assis dans le fauteuil vos pieds doivent toucher facilement le sol.

Veuillez à placer le SitnStand au plus profond du fauteuil.

Pour un meilleur confort, vous pouvez placer un oreiller entre le dossier de votre fauteuil et le dossier du coussin releveur.

Le coussin releveur SitnStand, de nombreux avantages en complément de l'utilisation d'un fauteuil releveur standard !	Fauteuil releveur Standard	Fauteuil releveur SitnStand
Peut se transporter à l'extérieur ?		
S'adapte à tous les types de fauteuil ?		
Fonctionne à l'aide d'une batterie ?		
S'agit-il d'un dispositif médical ?		
Se nettoie facilement ?		
Hauteur de levage ajustable ?		



45 avenue Georges Politzer - Z.A de Trappes-Élancourt 78190 TRAPPES  
Tél : +33 1 76 78 19 59 - Fax : +33 1 30 57 55 02 - Email : [infos@axsol.fr](mailto:infos@axsol.fr)

[www.axsol.fr](http://www.axsol.fr)