



COUSSIN RELEVEUR GONFLABLE SUR BATTERIE

SitnStand
Portable Smart Rising Seats



DIMENSIONS ET POIDS :

- Assise dégonflée : 40x53x1 cm
- Assise gonflée : 40x48x25 cm
- Sac de transport (inclus) :
42x54x14 cm
- Poids : 3,7 kg (4,2kg avec sac)
- Capacité : 120 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Temps gonflage/dégonflage de l'assise : env. 20 sec
- Mécanisme de contrôle : bouton poussoir ↑ et ↓
- Capacité gonflage: 1.7L/sec
- Hauteur maximum de gonflage du coussin : 20 cm
- Type de batterie : Lithium Ion 14,4V - 2,6 Ah
- Capacité batterie : 300 cycles
- Autonomie : minimum 50 gonflages
- Chargement batterie conseillé tous les 4 à 6 jours.*

Pour une plus grande indépendance en tous lieux

Le coussin releveur SitnStand permet à l'utilisateur de s'asseoir et de se relever seul, en toute sécurité et en douceur.

Ce matériel est aussi une aide précieuse pour les soignants et les aidants, en permettant de prévenir les TMS.

Son utilisation est très simple, grâce à un boîtier de commande et un petit compresseur sur batterie qui assure le gonflage de l'assise, ajustable selon vos besoins.

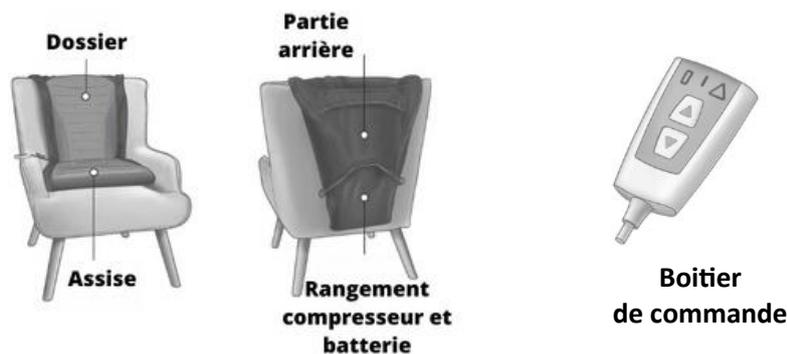

Pour vous asseoir, installez-vous confortablement au centre du coussin et pressez la flèche ↓. L'assise va se dégonfler lentement.

Pour vous relever, détachez votre dos du dossier, placez vos pieds près du siège, écartez les et appuyez sur la flèche ↑ pour lancer le gonflement de l'assise. Quand vous estimez avoir atteint la position désirée, vous pouvez vous redresser.



Mobile et sur batterie, le coussin releveur gonflable SitNStand se pose sur la majorité des chaises, fauteuils, salons de jardin etc. Vous pouvez l'utiliser partout, aussi bien chez vous, que lors de vos déplacements .



Le coussin releveur SitNStand, de nombreux avantages en complément de l'utilisation d'un fauteuil releveur standard !	Fauteuil releveur Standard	Coussin releveur SitNStand
		
Peut se transporter à l'extérieur ?	NON	OUI
S'adapte à tous les types de fauteuil ?	NON	OUI
Fonctionne à l'aide d'une batterie ?	NON	OUI
S'agit-il d'un dispositif médical ?	NON	OUI
Se nettoie facilement ?	OUI	OUI
Hauteur de levage ajustable ?	OUI	OUI

RECOMMANDATIONS :

- Ce dispositif convient aux personnes pouvant se déplacer seules.
- Lorsque vous êtes assis dans le fauteuil vos pieds doivent toucher facilement le sol.
- Veuillez à placer le SitNStand au plus profond du fauteuil.
- Pour un meilleur confort, vous pouvez placer un oreiller entre le dossier de votre fauteuil et le dossier du coussin releveur.



V03.22

AXSOL
VERS UN MONDE ACCESSIBLE

45, avenue Georges Politzer - 78190 TRAPPES - France
Tél. : +33 1 76 78 19 59 - Fax : +33 1 30 57 55 02 - Email : infos@axsol.fr

www.axsol.fr